



NACHSTEHEND ERHALTEN SIE WICHTIGE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM NACHLESEN AUFBEWAHREN. UNZULÄNGLICHE KONTAKTLINSENPFLEGE KANN ZU SCHWERWIEGENDEN SCHÄDIGUNGEN DER AUGEN FÜHREN.

Einflaschen Multifunktions-/ Desinfektionslösung

Zum Reinigen, Abspülen, Desinfizieren, Aufbewahren, Entfernen von Proteinen und Benetzen aller weichen Kontaktlinsen.

BESCHREIBUNG

Eine isotonische, wässrige, antimikrobielle/ antibakterielle* Lösung, die 0,0001 % Polyhexanide (aktiver Bestandteil und Konservierungsmittel), Dexpanthenol (Provitamin B5), Sorbitol, Natrium Phosphate, Tromethamine, Poloxamer 407 und Disodium Edetate enthält.

STERILE A Hergestellt unter aseptischen Bedingungen.

Enthält kein Chlorhexidine und kein Thiomersal.

Diese Lösung und der antibakterielle Linsenbehälter (enthält Silber) bieten Ihnen alles, was Sie für eine korrekte und komplette Linsenpflege benötigen.

GEBRAUCHSHINWEISE

Um eine korrekte Desinfektion Ihrer Linsen zu gewährleisten, müssen die Anweisungen vollständig beachtet werden.

Grundsätzlich gilt vor jeder Handhabung: Hände gründlich waschen und mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.

Beginnen Sie immer mit dem selben Auge, um Verwechslungen zu vermeiden!

- Öffnen Sie die rechte und linke Kammer des Linsenbehälters und füllen die Kammern bis zur Fülllinie mit frischer **Multifunktionslösung**.
- Nehmen Sie die Kontaktlinse vom Auge und legen Sie die Kontaktlinse auf die Handinnenfläche.
- Geben Sie auf jede Seite der Kontaktlinse mindestens 3 Tropfen **Multifunktionslösung**.
- Reiben Sie die Linse vorsichtig mit kreisenden Bewegungen mindestens 10 Sekunden lang.
- Spülen Sie die Linse gründlich mit der **Multifunktionslösung** ab und reiben Sie sie dabei mindestens 10 Sekunden lang vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger.
- Legen Sie die Linse in die entsprechende Kammer des Linsenbehälters und schrauben Sie den Deckel fest zu.



Wiederholen Sie die bisherigen Pflegeschritte mit der anderen Linse.

LASSEN SIE IHRE LINSEN MINDESTENS 5 MINUTEN IN DER LÖSUNG.

- Ihre Linsen sind jetzt sauber und desinfiziert und können direkt auf die Augen aufgesetzt werden.
- Für besten Tragekomfort der Linsen, spülen Sie diese vor dem Aufsetzen auf die Augen mit der **Multifunktionslösung** ab.
- Schütten Sie die Lösung aus dem Behälter, spülen Sie diesen mit frischer **Multifunktionslösung** ab und schließen Sie den Behälter bis zum nächsten Gebrauch.
- Wenn die Linsen vor dem Tragen länger als 30 Tage in der **Multifunktionslösung** aufbewahrt wurden, müssen Sie die Lösung aus dem Behälter schütten und den manuellen Reinigungsprozess wiederholen. Desinfizieren Sie die Linsen mindestens 5 Minuten in frischer **Multifunktionslösung**, bevor Sie sie wieder tragen.

GEGENANZEIGEN (Gründe zur Nichtverwendung)

- Nicht verwenden, wenn Sie empfindlich auf einen der Inhaltsstoffe oder allergisch auf Silber oder andere Metalle reagieren.
- Die **Multifunktionslösung** niemals zur thermischen Desinfektion verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- Vor der ersten Anwendung Unversehrtheit der Flaschenversiegelung überprüfen. Nicht verwenden, wenn die Versiegelung beschädigt ist.
- Flasche nach dem Gebrauch verschließen.
- Geöffnete Flasche innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
- Restliche Lösung weggießen.
- Niemals die Tropferspitze der Flasche mit Oberflächen in Berührung bringen, dies könnte die Lösung verunreinigen.
- Tauschen Sie den Kontaktlinsenbehälter mit jeder neuen Flasche der **Multifunktionslösung** aus.
- Unter 25°C aufbewahren.
- Fragen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser, bevor Sie Lösungen wechseln.

WARNHINWEISE

- Verwenden Sie immer frische **Multifunktionslösung**. Niemals gebrauchte Lösung in Ihrem Behälter ein zweites Mal verwenden, da diese nicht mehr wirksam ist.
- **NIEMALS die Multifunktionslösung** in ein anderes Behältnis umfüllen.
- **NIEMALS die Multifunktionslösung** verdünnen oder mit irgendeiner Lösung mixen, dies würde die Wirksamkeit zerstören.
- **Bringen Sie NIEMALS Ihre Kontaktlinsen mit unsterilen Flüssigkeiten (einschließlich Leitungswasser und Speichel) in Verbindung, da dadurch eine mikrobielle Verunreinigung erfolgen kann, die zu dauerhaften Schädigungen an den Augen führen könnte.**
- **VERWENDEN SIE IMMER DIE BESTANDTEILE DES PFLEGESYSTEMS, EINSCHLIEßLICH DES LINSENBEHÄLTERS. NICHT MIT BESTANDTEILEN ANDERER PFLEGESYSTEME VERMISCHEN.**
- **FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.**
- Bevor Sie irgendwelche Medikamente mit Ihren Kontaktlinsen verwenden, besprechen Sie dies mit Ihrem Augenarzt oder Kontaktlinsenanpasser.

HINWEIS

Sollten länger andauernde Unverträglichkeiten oder Reizungen auftreten, entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser auf.

Antibakterieller Linsenbehälter

Beim antibakteriellen Kontaktlinsenbehälter kann es sein, dass nach einiger Zeit die Farbe verblasst.

Diese Farbveränderung hat keinen Einfluss auf die antimikrobiellen Eigenschaften des Kontaktlinsenbehälters.

Wie bei allen Kontaktlinsenbehältern wird empfohlen, den Behälter mit jedem Kauf einer neuen Multifunktionslösung auszutauschen oder sich nach den Empfehlungen Ihres Kontaktlinsenanpassers zu richten.

*Wirksam gegen Keime und Mikroorganismen, gelistet ISO 14729.

Menicon Co., Ltd.
3-21-19, Aoi, Naka-ku,
Nagoya, 460-0006 Japan
© 2019, Menicon Co., Ltd.



Stand: 01/2019

Menicon Pharma SAS
Boulevard Sébastien Brant - Parc d'Innovation -
67100 Illkirch-Graffenhardsheim - FRANCE